

ATEMSCHUTZMASKE FFP2 NR PREMIUM

BEDIENUNGSANLEITUNG



Name der persönlichen Schutzausrüstung:
Atemschutzmaske FFP2 NR Premium

Importeur:
Made in EU (Tschechische Republik)

Vertrieb:
Lochmann Berufskleidung GmbH www.lochmann-bk.de

Verwendungszweck: Der Zweck der Atemschutzmaske besteht darin, seinen Träger zu schützen, indem die eingeatmete Luft gefiltert und die Übertragung einer COVID-19-Infektion zwischen Personen verringert wird. Die Filtrationseffizienz beträgt $\geq 95\%$. Es handelt sich um ein Einweggerät.

Effizienzgrad: Klasse FFP2 NR.

Besondere Aufmerksamkeit sollte Warnschildern gewidmet werden.

Applikationsverfahren:

Setzen Sie das Gerät nur mit sauberen Händen auf. Alle Komponenten der Atemschutzmaske sollten vor dem Gebrauch auf Beschädigung überprüft werden. Verwenden Sie dabei beide Hände.

1. Packen Sie die Atemschutzmaske aus und fassen Sie die seitlichen Gummibänder an.
2. Legen Sie die Atemschutzmaske so auf Ihr Gesicht, dass es Ihre Nase sowie Ihren Mund bedeckt – und unter Ihrem Kinn endet.
3. Befestigen Sie die seitlichen Gummibänder hinter Ihren Ohren.
4. Überprüfen Sie mit den Fingern und formen Sie den Clip, der an die Nase eng anliegt, in gewünschte Form.
5. Überprüfen Sie am Umfang der Atemschutzmaske, ob sie ans Gesicht eng anliegt.

Illustratives Bild des Applikationsverfahrens:



FFP2 Maske und weitere Hygiene- und Schutzartikel hier erhältlich:
Lochmann Berufskleidung GmbH
Sulzbacher Str. 178
71522 Backnang
Telefon 07191 88329 FAX 07191 86195
Internet: www.lochmann-bk.de E-Mail: info@lochmann-bk.de

Kontrolle der Dichtheit und des Aufsetzens:

1. Decken Sie die Vorderseite der Atemschutzmaske mit beiden Händen ab – gehen Sie dabei mit Vorsicht vor, damit sich demzufolge die Position der Atemschutzmaske nicht verändert.
2. Atmen Sie heftig aus.
3. Wenn die Luft um die Nase eindringt, passen Sie die Form des Nasenclips an. Überprüfen Sie die Dichtheit des Aufsetzens erneut wie oben beschrieben.
4. Wenn die Luft an den Rändern der Halbmaske eindringt, passen Sie die seitlichen Gummibänder hinter Ihren Ohren an, bis das Eindringen von Luft beseitigt ist Überprüfen Sie die Dichtheit des Aufsetzens wie oben beschrieben.
5. Sollte es nicht gelingen, das Gerät ordnungsgemäß aufzusetzen, ersetzen Sie die Atemschutzmaske und verwenden Sie die ursprüngliche nicht weiter.
6. Erst wenn keine Luft eindringt, können Sie die Atemschutzmaske verwenden.

Lagerungshinweise:

Vor Sonnenstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

Die Atemschutzmaske FFP2NR Premium erfüllt die Anforderungen von europäischen Normen EN149:2001 + A1:2009

Sicherheitshinweise:

- Vergewissern Sie sich jedes Mal, dass das Produkt vollständig ist, richtig sitzt und innerhalb der gesamten Wirkung der Substanz auf den Organismus getragen wird.
- Dieses Gerät schützt nicht vor Gasen/Ausdünstungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Schutz gegen Luftschadstoffe, deren Konzentrationen nicht bekannt oder unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Bart oder ein anderes Gesichtshaar haben, die enge Haftung zwischen Gesicht und Schutzgerät verhindern könnten.

- Dieses Gerät eliminiert das Risiko einer Erkrankung oder Infektion nicht.
- Melden Sie alle schwerwiegenden, im Zusammenhang mit diesem Gerät eingetretenen Vorfälle der Cool agency, s.r.o. und der zuständigen Kontrollbehörde vor Ort.
- Vernichten und ersetzen Sie die Atemschutzmaske FFP2 NR Premium, falls sie mit Blut oder anderen infektiösen Kontaminanten kontaminiert ist, falls sie beschädigt ist oder falls das Atmen schwierig wird. Nach deren Gebrauch stellen Sie sicher, dass sie gemäß den Anforderungen der Richtlinie zur Entsorgung gefährlicher infektiöser Stoffe entsorgt wird.
- Dieses Gerät ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die wiederholte Verwendung kann zu Kreuzkontamination führen, die Sicherheit des Benutzers bedrohen und die Gesamtleistung des Produkts beeinträchtigen. Kontaminierte Produkte müssen gemäß den nationalen Vorschriften als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Ändern, reinigen oder reparieren Sie dieses Gerät nicht.
- Dieses Gerät ist nicht feuerfest. Verwenden Sie es nicht in direktem Kontakt mit offener Flamme.
- Verwenden Sie es nicht in Luft mit weniger als 19,5% Sauerstoff (Definition von Cool agency, s.r.o.; einige Länder haben möglicherweise ihre eigenen Definitionen für Sauerstoffmangel; wenn Sie sich nicht sicher sind, suchen Sie professionelle Hilfe auf)

Die Nichtbeachtung der oben erwähnten Anweisungen oder der unsachgemäße Umgang mit dem Gerät für den Atemschutz während des Aufenthalts des Benutzers in einer kontaminierten Umgebung kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und zu schweren Erkrankungen führen.

Der Monat und das Jahr der Herstellung und Ablaufdatum der Lebensdauer des Gerätes sind auf der Verpackung jedes einzelnen Gerätes angegeben.

Atemschutzmaske FFP2 NR PREMIUM 5-lagig

Produktcode: PRM2403

Die Atemschutzmaske der Klasse FFP2 ist für den Schutz ihres Trägers durch die Filtration der Atemluft und die Verringerung der Übertragung von Infektionen von Mensch zu Mensch bestimmt. Die Filtrationswirkung ist mindestens 95 %.

Es handelt sich um ein Medizinprodukt gemäß der Richtlinie 93/42/EWG und gleichzeitig um eine persönliche Schutzausrüstung gemäß der Verordnung 2016/425. Das Erzeugnis ist mit der CE-Kennzeichnung versehen, die die Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Rechtsvorschriften gewährleistet.

➔ Eigenschaften

Einmaliger Gebrauch
Angenehm und komfortabel
Farbe: weiß
Material: Baumwolle + Vliesstoff
Schutzklasse: FFP2 NR
Filtrationsstufe: $\geq 95\%$
Größe: universal

➔ NORMEN FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG

EN 149:2001 +A1:2009

➔ Verpackung

10 Masken

➔ Gebrauchsanweisung



➔ hier erhältlich:

Lochmann Berufskleidung GmbH
www.lochmann-bk.de



10 St - PRM2403/10



8 592445 246096